

**CZ**

Hydrogel pro pokrytí a zvlhčení akutních a chronických ran.

- Vlastnosti:**
- Pro pokrytí a zvlhčení suchých stále povleklých ran
  - Pro opakované použití

- Indikace:**
- Krytí akutních a chronických ran
  - Zvlhčení stále povleklých, suchých a méně sekretujících ran

**Pokyny k použití:**

Nejprve opláchněte/vypláchněte a vyčistěte ránu pomocí roztoku NAWAlution pro odstranění lehce rozpustných kontaminací. Následně pokryjte povrch rány 3-5 mm vrstvou přípravkem NAWA Hydrogel nebo jím vyplňte celou dutinu.

Také výplň rány, např. alginát nebo hydro vlákno, můžete navlhčit přípravkem NAWA Hydrogel a následně vložit do rány. NAWA Hydrogel lze použít v kombinaci s běžnými krytími na rány, např. PU pěny a kompresními obvazy. NAWA Hydrogel lze ponechat na ráně až do dalšího převazu. Ošetření by mělo být opakováno, dokud nebude možné snadno odstranit všechny kontaminace a rána bude vypadat vizuálně čistá.

**Kontraindikace:**

Nepoužívejte, pokud máte alergii nebo podezření na možné alergické reakce na jednu ze složek gelu. Nepoužívejte v kombinaci s anionickými tenzidy. Nepoužívejte v kombinaci s krytím obsahujícím stříbro. Vyvarujte se kontaktu s chrupavčitou tkání. Nepokrývejte okraje rány Hydrogelem NAWA z důvodu rizika macerace.

V případě velkých, silně sekretujících nebo infikovaných ran kontaktujte lékaře, protože v takovém případě je nezbytné speciální ošetření. Kontaktujte lékaře také v případě popáleniny stupně 2b nebo vyšší.

Aplikace pro těhotné nebo kojící ženy, kojence a batolata / malé děti by měla být prováděna pouze s indikací po konzultaci s lékařem.

**Vedlejší účinky:** Nejsou známy. V případě výskytu jakékoliv závažné nežádoucí příhody ohlaste tuto skutečnost výrobcí a příslušnému státnímu orgánu.

**Tolerance tkání a biokompatibilita:**

NAWA Hydrogel neobsahuje složky dráždivé pokožku. Je nedráždivý a nesenzibilizující.

**Obecné bezpečnostní pokyny:**

Vezměte v úvahu teplotní limit. Nepoužívejte poškozená balení. Používejte pouze bezchybná a nepoškozená balení. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte na suchém místě. Vezměte v úvahu návod k použití. Nepoužívejte po vypršení doby použitelnosti. Pouze k vnějšímu užití. Nepolykejte. Dbejte na hygienické použití. Po použití uzavřete, aby nedošlo ke kontaminaci. Tubu zlikvidujte ihned po kontaktu otvoru tuby s ranou nebo v případě jiné kontaminace. Držte mimo dosah dětí.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od výroby

**Časový limit pro použití:** 4 týdny po otevření

**Velikosti balení:**

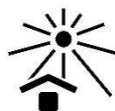
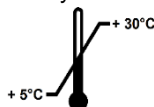
e 10 x 5 ml plastové tuby	REF: 1235849510
e 40 ml plastové tuby	REF: 1235849040
e 50 ml plastové tuby	

**Číslo šarže/:**  vytištěno na skládací krabici a vyraženo na tubě

**Datum spotřeby/:**  vytištěno na skládací krabici a vyraženo na tubě

**Složení (INCI):**

Aqua purificata, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Cocamidopropyl Betaine, Benzyl Alcohol (a) Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone, Polyaminopropyl Biguanide, Stopové prvky (Zinek, Železo)

**CE 0197**

**NAWA Heilmittel GmbH**  
Ostendstrasse 100 • D-90482 Nürnberg  
Telefon: +49 (0) 911-544 41-10  
Telefax: +49 (0) 911-544 41-11  
E-Mail: info@nawa.com  
www.nawa-medical.com

Vyrobena v Německu  
REV 032020