

CZ

NAWAlution je roztok bez alkoholu k čištění, dekontaminaci, zvlhčování a hojení akutních a chronických ran.

Doporučujeme používat s NAWA Hydrogel (10 x 5 ml, 40 ml) pro pokrytí a zvlhčení rány, a také s Elektrolyt-Salbe S (20 g, 100 g) pro ochranu okrajů rány.

Vlastnosti:

- Pro bezbolestné čištění akutních i chronických ran
- Účinná dekontaminace potažených a kontaminovaných ran (např. MRSA)
- Zničení biofilmu
- Řeší krusty rány a přilnavý obvazový materiál
- Zabraňuje infekcím
- Zlepšuje hojení ran
- Překonává fázi chronicko-stagnační během hojení rány
- Optimalizuje prostředí na povrchu rány (pH úroveň)
- Snižuje bolest
- Chladící efekt
- Může být používán několikrát denně
- Může být používán v kombinaci s běžnými produkty/obvazy pro péči o rány

Akutní rány jsou často kontaminovány nečistotami, špínou nebo mikroorganismy. V těchto případech je pro rychlé hojení rány důležité důkladné a jemné vyčištění. Chronické rány jsou často pokryty exsudátem z rány, nekrotickou tkání nebo biofilmy. Tyto povlaky zpomalují hojení ran, a proto musí být odstraněny. U obou typů ran je doporučeno jemné a důkladné očištění a dlouhodobé zvlhčení pomocí NAWAlution. NAWAlution nabízí vynikající čisticí aktivitu na povrchu rány a okolní pokožce.

Indikace:

- Pro čištění a zvlhčování akutních a chronických ran
- Pro odstranění přilnutého obvazového materiálu nebo krust během převazu.
- Pro dekontaminaci

Pokyny k použití:

Čištění rány: Očistěte ránu přípravkem NAWAlution, abyste uvolnili povlaky a / nebo biofilm. NAWAlution lze aplikovat neředěný přímo z lahve do rány. Lahve 500 ml a 150 ml jsou určeny k čištění ran, spreje 50 ml a 500 ml pro velkoplošné stříkání a 150 ml pěna pro aplikaci pěny do rány. Následně by měl být roztok NAWAlution odstraněn tampony obvyklým sterilním gázovým obkladem (mechanické čištění). Oplachování není nutné.

Zvlhčení rány obvazy: Nasákněte obvyklé obvazy (např. kompresní obvazy, gázy) přípravkem NAWAlution a aplikujte na ránu po dobu cca. 10-15 min. Následně by se rána měla mechanicky vyčistit obvyklým sterilním gázovým obkladem.

Kontraindikace:

Nepoužívejte, pokud máte alergii nebo podezření na možné alergické reakce na jednu ze složek roztoku. Nepoužívejte v kombinaci s anionickými tensidy. Nevylhčete obvazy obsahující stříbro přípravkem NAWAlution. Vyvarujte se kontaktu s chrupavčitou tkání. V případě velkých, silně sekretujících nebo infikovaných ran kontaktujte lékaře, protože v takovém případě je nezbytné speciální ošetření. Kontaktujte lékaře také v případě popálenin 2b nebo vyššího stupně.

Aplikace pro těhotné a kojící ženy, kojence a batolata / malé děti by měla být prováděna pouze s povinnou indikací po konzultaci s lékařem.

V případě výskytu jakékoliv závažné nežádoucí příhody ohlaste tuto skutečnost výrobci a příslušnému státnímu orgánu.

Tolerance tkání a biokompatibilita: NAWAlution je necytotoxický, nedráždivý a nesenzibilizující. NAWAlution neobsahuje přísady dráždivé pokožku.

Obecné bezpečnostní pokyny:

Zvažte teplotní limit. Nepoužívejte poškozená balení. Používejte pouze bezchybná a nepoškozená balení. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte na suchém místě. Vezměte v úvahu návod k použití. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Pouze k vnějšímu užití. Nepolykejte. Nepoužívejte k infuzi nebo injekci. Dbejte na hygienické použití. Láhev zlikvidujte ihned po kontaktu lahve s ranou nebo v případě jiné kontaminace. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití uzavřete a zabraňte kontaminaci.

Doba použitelnosti/ Datum spotřeby: 3 roky od výroby

Časový limit pro použití: 3 měsíce po otevření


Velikosti balení: 50 ml Sprej (PZN: 05743361) 500 ml Sprej (PZN: 01162503) 150 ml Pěna (PZN: 11551803)
2 x 150 ml (PZN: 01352095) 500 ml (PZN: 01352020)

Číslo šarže/  a Datum spotřeby/  : vytištěno na skládací krabici a/nebo na lahvi

Složení (INCI):

Aqua purificata, Cocamidopropyl Betaine, Polyaminopropyl Biguanide, Stopové prvky (Zinek, Železo)

CE 0197

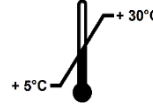

NAWA Heilmittel GmbH
Ostendstrasse 100 • D-90482 Nürnberg
Telefon: +49 (0) 911-544 41-10
Telefax: +49 (0) 911-544 41-11
E-Mail: info@nawa.com